

Használati utasítás EUROLIGHT C10, EUROLIGHT F.O. , EUROLIGHT VET, COMBILIGHT F.O., Mini otoscop szett és EUROLIGHT C diagnosztikai szett készülékekhez

Alkalmazás

Ezeket az otoscopokat csak a külső fül vizsgálatára és általános nem invazív vizsgálatára szabad használni. A vizsgálat csak akkor végezhető el, amikor a fültölcsér rá van illesztve. Pneumatikus teszteknel a nyomást nagy gondossággal kell végezni. Az EUROLIGHT VET állatorvosi célokra ajánlott.

Az otoscopokat, otoscop szetteket csak szakember használhatja.

Használat

Az otoscopot csak egyszerhasználatos vagy sterilizálható fültölcsér ráillesztése után szabad bevezetni a külső fülbe. Tegyük rá a fültölcsért az otoscopra és ütközésig csavarjuk el jobbra, hogy rázáródjon.

A nagyító lencse:

3x-os nagyítású, (kivéve az EUROLIGHT VET, melynek 2x-es, és a Mini-otoscop szett, melynek 2,5x-es nagyító lencséje van)

Pneumatikus teszt (csak az Eurolight F.O. , Eurolight C10, Eurolight C30 és Eurolight Vet készülékekkel végezhető). A pneumatikus teszt a dobhártya vizsgálatára szolgál. A teszt elvégzéséhez szükséges a külön megvásárolható pneumatikus labda és a fém adapter (az otoscopnak és a szetteknek nem tartozékai). A fém adaptert helyezze az otoscop-fej mélyedésébe, majd illessze rá a labdából kivezető gumicsövet. A kívánt levegőmennyiséget óvatosan pumpálja a dobhártyára.

Általános megvilágítás

Az otoscopot fültölcsér nélkül általános megvilágításra, pl. bőr vagy a szájüreg vizsgálatára is lehet használni. A készülék érzékeny vagy sérült bőrrel történő érintkezését kerülni kell.

Izzócsere FO-s modelleknél

Csavarja le az otoscop fejrészét a nyélről. Az izzó a fejrészben található, hüvelykujjal és mutatóujjal könnyen eltávolítható, cserélhető.

Izzócsere C-s modelleknél

Fordítsa el a lencsét egyik oldalra, és egyszerűen csak húzza ki az izzót, és helyezzen be egy másikat.

Tisztítás, sterilizálás

A készülék nem igényel speciális karbantartást. Az elemtartó nyél kívülről nedves, nem hulló szálas ruhával áttörölhető. Fertőtlenítésre aldehid, formaldehid és alkohol tartalmú szerek használata javasolt, a lencsét azonban tilos alkoholos fertőtlenítővel tisztítani. A készüléket soha ne merítse folyadékba. Tekintve, hogy a készülék nem sebészi beavatkozásra készült, szükségtelen sterilizálni, elég a fent leírt fertőtlenítés.

Az otoscop fültölcsérei igény szerint sterilizálhatók, sterilizálási hő gőzsterilizátorban.

A szett egyéb tartozékai: 1 db fém nyelvlapoc, 1-1 db 3-as és 4-es méretű gégetükör, 1 db lámpatartó, 1-1-1 db 2,5/3,5/4,5 mm átmérőjű tartós fültölcsér, nyelvlapoc tartó, pótló izzó, cipzárás hordtáska.

Garanciális jótállási jegy

Cégünk az Ön által vásárolt készülékre a vásárlás napjától számított 12 hónapra jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt vállalja, hogy kijavítja a hibát vagy kicseréli a készüléket, amennyiben a hiba eredete gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza. Nem vonatkozik a garancia a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra. Ha a termék működtetésével kapcsolatban rendellenességet tapasztal, kérjük, forduljon bizalommal cégünkhöz.

Forgalmazó és szerviz:
242-2924

REXTRA KFT 1031 Budapest, Emőd u. 38.

Tel:

A vásárlás időpontja:

Aláírás, bélyegző: